

Hyal-System

Ácido hialurónico - Sal de Sodio
INSTRUCTIVO PARA MÉDICOS

Descripción del producto

HYAL-SYSTEM® es una solución estéril de la sal de sodio del ácido hialurónico, sin pirógenos y altamente viscosa que únicamente debe ser administrada por el médico. El ácido hialurónico es un polisacárido biológico que está presente en toda la matriz intercelular de la mayoría de los tejidos, incluida la piel. Gracias a la función hidratante natural del ácido hialurónico y a su viscoelasticidad, HYAL-SYSTEM® mejora la fuerza tensora y elasticidad de la piel.

Composición

Constituyente principal: 20mg Ácido hialurónico-sal de sodio (fracción de Hyaloftil®), vehículo c.s.

Otros constituyentes:

Cloruro sódico, fosfato disódico dodecahidratado, fosfato monosódico dihidratado, agua para inyección.

Campos de aplicación

Gracias a la viscoelasticidad y a las propiedades hidratantes del ácido hialurónico, HYAL-SYSTEM® está indicado para el rejuvenecimiento cutáneo, ya que, además de permitir una corrección de mediana duración de los defectos de contorno cutáneo, aumenta la turgencia y la elasticidad de la piel.

Dosificación y modo de aplicación

HYAL-SYSTEM® se aplica con una aguja fina (normalmente 30 G 1/2, 0,3 x 13mm), inyectándose la solución en las capas superiores hasta medianas o medianas/profundas de la dermis. Esto dependerá de los resultados que se esperan. En función de las áreas a tratar pueden emplearse diferentes técnicas: en principio, para las inyecciones en capas medianas o medianas/profundas de la dermis se recomienda utilizar una técnica lineal. Para el tratamiento de superficies amplias del rostro (mejillas) se recomienda utilizar una técnica lineal cruzada. Las arrugas pequeñas se pueden corregir mediante aplicación superficial con técnica lineal o de punción en serie.

Conviene no excederse en la corrección de los defectos. Una vez realizado la aplicación, se recomienda masajear suavemente el área corregida para facilitar una mejor distribución del preparado.

Para lograr un resultado óptimo de rejuvenecimiento cutáneo, se recomienda adaptar el esquema de tratamiento a las particularidades de cada paciente.

Contraindicaciones

Al igual que ocurre con cualquier otra aplicación intradérmica, la aplicación no debe realizarse en áreas del cuerpo que estén afectadas por alguna infección o proceso inflamatorio.

El producto no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los constituyentes de HYAL-SYSTEM®.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Medidas de precaución

Aplicar sólo en condiciones asépticas. Como ocurre con cualquier otro procedimiento percutáneo, la aplicación de HYAL-SYSTEM® también conlleva un riesgo de infección.

Advertencias

No utilizar si el envase está dañado. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

La fecha de caducidad se refiere al producto en su envase original y conservado en el refrigerador a una temperatura de entre +2 y +8 °C. La solución en la jeringa preparada es estéril.

Si el paciente recibe varias inyecciones, es posible que la aguja de inyección resulte dañada. Se recomienda utilizar la otra aguja que viene incluida en el paquete. El producto está concebido para ser utilizado una sola vez. La jeringa debe desecharse inmediatamente después del tratamiento, independientemente de si se ha aplicado o no la solución en su totalidad.

Tras la utilización debe eliminarse el producto siguiendo la normativa vigente en cada país.

Guardar el producto fuera del alcance de los niños.

Reacciones al tratamiento

En el punto de inyección pueden producirse las reacciones habituales, como enrojecimiento o hinchazón. Estas reacciones desaparecerán de forma espontánea al cabo de pocas horas. Muy ocasionalmente pueden producirse pequeños equimosis, que también desaparecerán de forma espontánea transcurridos unos pocos días.

Interacciones

HYAL-SYSTEM® puede utilizarse en combinación con preparados tópicos de gentamicina y con anestésicos superficiales que contengan lidocaína.

HYAL-SYSTEM® no debe utilizarse junto con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario, ya que podrían precipitar el ácido hialurónico.

Almacenamiento

Guardar en refrigeración entre +2 y +8 °C.

Presentación


- Envase con una jeringa desechable prellenada con 1,1 ml de solución para la inyección, con soporte para el dedo y dos agujas estériles.

Además, cada envase contiene un adhesivo para el médico, en el que figuran el nombre del producto, el número de lote y la fecha de caducidad.

El contenido de la jeringa es estéril y sin pirógenos.

Montaje de la jeringa

1. Colocar el soporte para el dedo y presionarlo hacia abajo, hasta que quede perfectamente encajado en la brida.
2. A continuación, montar la aguja.

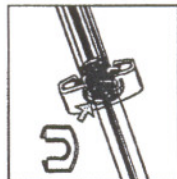

Venta bajo prescripción médica

Fabricante

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme, Italia

Titular

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt, Alemania

CE 0459

 **fidia**
farmaceutici

 **MERZ**